

Techniques de prise d'empreintes et Relation Inter-Maxillaire (RIM)



Matériel requis : Silicone ou Alginate, Cire à boxer, Cire d'occlusion, Porte-empreinte.




Au maxillaire, obtenir un enregistrement net des surfaces de rétention situées sur la gencive jusqu'au fond du vestibule. Dynamiser les lèvres et les freins une fois le porte-empreinte inséré, pour les marquer dans le matériau d'empreinte. Cela permet d'avoir une vue réelle des surfaces à exploiter, sans les dépasser.



Au maxillaire, installer la cire à boxer sur le haut du porte-empreinte afin d'obtenir un enregistrement précis des surfaces de rétention.



A la mandibule une simple empreinte dentaire est nécessaire.

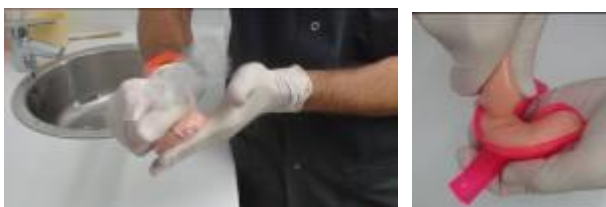

Préparer l'alginate ou le silicone et le placer sur le porte-empreinte



Pour la relation inter-maxillaire (RIM), utiliser une cire d'occlusion pour un parfait emboîtement des dents du haut et du bas.



Les empreintes du haut et du bas ainsi que la cire d'occlusion sont prêtes à être envoyées dans un conditionnement humide.